

BVD Oorbiopten, zo makkelijk werkt het

Steeds meer veehouders gebruiken oorbiopten om vrij te worden en blijven van BVD. Niet verwonderlijk, met oorbiopten is het mogelijk BVD-dragers er direct na de geboorte uit te pikken. En het nemen van een biopt kan in één handeling met het oormerken. Hebt u al eens gezien hoe eenvoudig het werkt? Hierbij een beeldverslag.



Oorbiopt-oormerken en bijbehorende tang bestelt u gewoon bij uw eigen oormerkleverancier.



U brengt de oormerken aan in de tang...



...en knipt ze op de gebruikelijke manier in het oor.



In de holte van de biopnaald zit nu het oorbiopt (een stukje weefsel).



Plaats het meegeleverde plastic buisje over de biopnaald en druk goed aan.



U kunt het buisje met de naald erin nu van de tang halen.



Vul het levensnummer dat op het buisje staat in op het meegeleverde inzendformulier.



Verpak het buisje in de meegeleverde sealbag.



Gebruik de meegeleverde antwoordenvolp voor verzending.



In het laboratorium van de GD wordt het biopt uit de naald gedrukt...



...en met een ELISA-test onderzocht op BVD-virus.



De uitslag staat binnen 5 werkdagen op VeeOnline.

Meer informatie en een instructiefilmpje vindt u op www.gddiergezondheid.nl/bvd

NB: in dit verslag is gebruikgemaakt van een van de beschikbare oormerkertangen, andere tangen kunnen net iets anders werken.